

PULSOKSYMETR ME5

- Pulsoksymetr napalcowy ME5 przeznaczony jest do wyrzykowego pomiaru saturacji i pulsu u pacjentów o wadze powyżej 25kg. Do stosowania profesjonalnego i domowego.
- Pulsoksymetr należy założyć na palec, najlepiej wskazujący - ręce powinny być ciepłe, bez lakieru na paznokciach a ułożenie dłoni stabilne.
- Pulsoksymetr włącza się jednym przyciskiem, po chwili na wyświetlaczu LED pojawiają się kreski.
- Klips z pulsoksymetrem należy nacisnąć z jednej strony tak aby można było włożyć palec w powstałą po drugiej stronie szczelinę
- Po około 3-5 sekundach - pojawia się wynik cyfrowy na wyświetlaczu.
- Pulsoksymetr wyposażony jest w duży i wyraźny wyświetlacz LED, o niskim poborze energii. Wynik należy czytać od strony klamry klipsa (jest to strona przeciwna do pacjenta)
- Pulsoksymetr posiada cyfrowe wyświetlenie pulsu PR BPM, w zakresie od 30 do 235 uderzeń na minutę i saturacji %SpO2, w zakresie od 35 do 99 %. Odczyt pulsu będzie w linii z 3-cyfrowymi wyświetleniami a odczyt saturacji w linii z dwucyfrowymi wyświetleniami.
- Posiada cyfrowe wyświetlenie jakości sygnału, mówiące o sile sygnału docierającego do diody. Jeśli siła sygnału jest mała - należy rozgrzać ręce, zmyć lakier z paznokci jeśli jest, przygotować się do pomiaru w pozycji spokojnej, z ręką ułożoną na stałej podporze.
- Po zdjęciu klipsa z palca, pulsoksymetr sam się wyłącza.
- Wymiary : długość 58 x szerokość 32 x wysokość 34mm

Wyposażenie do PULSOKSYMETRU ME5

- silikonowa ochrona na klips, zabezpieczająca pulsoksymetr przed uszkodzeniem podczas upadku, uderzenia
- 1 x pokrowiec na pulsoksymetr
- 2 x baterie AAA
- 1 x wygodna zawieszka na szyję

